

Schilder

Container und Siebe können dauerhaft mit haltbaren Barcodeschildern versehen werden. Bei der Befestigung des Siebschildes wird zusätzlich eine Halterung benötigt. Auf diesem Weg entfällt somit der

Barcode-Etiketten-Ausdruck. Durch das Scannen des Barcodes auf dem Hygieneschild werden im Programm direkt die Informationen hierzu verarbeitet und gespeichert.



Hygieneschilder werden über das Programm bestellt. Hierzu werden alle bereits gespeicherten *Siebe* und *Container* berücksichtigt. Öffnen Sie über den Menüpunkt *Hygiene*, Auswahlpunkt *Schilder* das Fenster *Bestellung von Barcodeschildern*.

estellung von Barcode-Schildern					- •		
klessen Abbruch Stormieren Elkern Bestellung Hiffe							
terung							
Bestellung Barcode-Schilder			c	Container			
rcode Kurzbezeichnung Anzahl Halterungen		Barcode	Bezeichnung	Schilder Status			
	i n	e000010001	OST 1	1 kein Schild			
		e000010002	WSR 1	1 kein Schild			
		e000010003	Implantologie 1	1 kein Schild			
		E000010004	Prophylaxe	0 kein Schild			
		E000010005	Extrakt OK 1-5	0 kein Schild			
		E000010006	Extrakt UK 1-5	0 kein Schild			
		E000010007	ZE Präp 1	0 kein Schild			
	=			Siehe			
	-						
		Barcode	sezeichnung	Schider Status			
				Pe000020001	OST-Sieb1	u kein Schild	
		5000020002	WSK-SIEU1	u kein Schild			
		E000020004	Propriyaxe SIED1	1 Kein Schild			
		E000020005	Extract UK1-5 SIED	o Kein Schild	-		
		E000020003	Zahoreinigung Sieh?	0 kein Schild			
		E000020008	7F Prän 1	0 kein Schild			
		E000020008	7E Prin 2	0 kein Schild			
		2000020009	Lettop L	S Kell Juliu	_		

Abbildung 2



Datentabellen

Das Fenster weist drei Tabellen aus: eine *Container*-Tabelle (mit einer 1 markiert), die Auskunft über gespeicherte *Container* mit zugehörigem *Barcode* gibt und über den *Schilderstatus* informiert, eine *Siebe*-Tabelle (mit 2 versehen) und eine Tabelle *Bestellung Barcode-Schilder* (mit 4 gekennzeichnet) Nach dem *Schilder-Status* kann zusätzlich per Drop-Down-Button gefiltert werden.



Abbildung 3

Bestellung von Barcodeschildern

In den Tabellen *Container* (1) und/oder *Siebe* (2) werden alle *Container* bzw. *Siebe* markiert für die ein haltbares Barcodeschild bestellt werden soll. Die markierten Daten werden über den grünen *Pfeil*-Button (3) in die Tabelle *Bestellung Barcode-Schilder* (4) eingefügt.

Die Bestellung von neuen Barcodeschildern sollte stets über dieses Fenster *Bestellung von Barcode-Schildern* durchgeführt werden, um eine korrekte Nummerierung der Container- bzw. Siebschilder sicherzustellen!

Barcode	Kurzbezeichnung	Anzahl	Halterunger
E000010001	OST 1	1	
E000010002	WSR 1	1	
E000010003	Implantologie 1	1	
E000010004	Prophylaxe	1	
E000010005	Extrakt OK 1-5	1	
E000010006	Extrakt UK 1-5	1	
E000020001	OST-Sieb1	1	
E000020002	WSR-Sieb1	1	
E000020003	Implantologie-Sieb1	1	
E000020004	Prophylaxe Sieb1	1	
E000020005	Extrakt OK1-5 Sieb	1	
E000020006	Extrakt UK1-5 Sieb	1	
E000020008	ZE Präp 1-Sieb-Sieb	1	

Abbildung 4



Bei Siebschildern wird zusätzlich eine *Halterung* benötigt, um das haltbare Plastikschild dauerhaft am *Sieb* zu befestigen. Über den *grünen Haken-Button* wird die Bestellung generiert.

Ist für die Praxis mehr als eine *Kennung* gespeichert, öffnet sich das Fenster *Auswahl*, in dem die korrekte *Kennung* ausgewählt wird.

Auswahl		×	
Kennung	Praxis Hinze	•••	
<u>0</u> K	Abbrechen		
Abbilduna 5			

Anschließend öffnet sich das Druckvorschaufenster Bestellung Barcodelabel.

	Bestellung	Barcodelabel									- • ×
	Schliegsen	100%	Zoom -	S Drucken	Sinstelungen	E-Mail	C Erste Seite	CO Seite gurück	Seitelyor	U Letzte Seite	PDF-Export
			Bestellformular	AESCI	JLAP - Barco	deschilder			1		*
			Aesculap AG & Co Walter Kohler Am Aesculap-Platz 78532 Tuttlingen	KG		Telefon Fax: e-mail:	07461-95-24 07461-95-29 walter.kohler	67 43 @aesculap.de			
			Ihre Daten:	Name Hir	nze						
			Vor	name U c	lo						
			S	itraße Bu	ttstegge 1						
			PLZ ur	d Ort 48	734 Reken						
			Verrechnung über Dental I I Ans	rmein Depot Name schrift							E
			Artikelnummer	Bezeict	nung			Preis €	(St) zzgl. Mwst.		
			ICD-002	 Baro max 	odeschild für Ae Beschriftungslä	sculap-Conta nge 20 Zeiche	iiner + Siebe an		6,40€		
			JG625R	 Halte Sieb 	erung zum Befest en	igen von Barc	code-Schildern	auf	8,10€		
			Bestellung: Bitte geben Sie je z.B. WSR 1, WSF	weils die 8 2, Chin	e gewünschte E urg. 1, etc.	lezeichnung	mit fortlaufend	ler Nummerie	erung an,		
Seite	e 1	von	2								

Abbildung 6



dios MP

DOC

Bestellung Barcodelabel											- • •
Schliegsen 100% Ansicht	Zoo	3 m	S Drucken	Sinspellungen	E-Mail	Erste S	eite Seite g	urück	C) Seite <u>v</u> or	Letzte Seite	PDF-Export
Congan 100% Acade	200 Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Datu	ICD-002 E E000110001 E000110002 E00011002 E00011002 E0001002 E00020002 E00020002 E00020000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E0002000 E00002000 E00002000 E0000000 E0002000 E000000 E0000000 E0000000 E0000000 E000000	Barcode 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Indexingen ICD-6 OGT 1 WER 1 Perphases Exercise 10:15 Exercise 10:15 Ex	E-Mail 102 Text 2wischens 191	Gee	ICD-002 Anz.		Anz		<u>Pirtegor</u>
Seite 2 von	2										al

Abbildung 7

Geben Sie anschließend die Bestellung über den *Drucken*-Button aus oder versenden die Bestellung per Button *E-Mail* direkt.

Zuordnung der Barcodeschilder

Nach Erhalt der bestellten Barcodeschilder müssen diese den div. *Sieben* bzw. *Containern* zugeordnet werden. Öffnen Sie dazu die *Container- bzw. Siebverwaltung* und scannen direkt den Barcode ab. Direkt wird anhand des gescannten Barcodes das passende *Sieb* bzw. der passende *Container* zugeordnet und in die Datenmaske aufgerufen.





Ist der gescannte Barcode noch keinem Sieb bzw. Container zugeordnet, öffnet sich das Fenster Neuaufnahme.

Nr.	7	Abk. Zahnreinigung Sieb	Barcode E000020007	Serien-Nummer	^
	5	Extrakt OK1-5 Sieb	E000020005		
	9	ZE Prap 2	E000020008	B-25698	
	8	ZE Präp 1	E000020008	AS5680	
	2	WSR-Sieb1	e000020002	2342534	
	3	Implantologie-Sieb1	E10003	23542553	
	4	Prophylaxe Sieb1	E000020004	4234243	E
		OST-Sieb1		5434534	
	leu	Abgleic	hen	Abbruch	Hilfe

Ist das *Sieb* bzw. der *Container* für den gescannten Barcode noch nicht angelegt, wird hier der Button *Neu* angeklickt. Sollte das *Sieb* bzw. der *Container* für diesen Barcode bereits angelegt sein, wird der Button *Abgleichen* angeklickt. Dann wird der Barcode mit dem ausgewählten *Sieb* bzw. *Container* verknüpft und ist diesem dauerhaft zugeordnet.

Bestätige	n 💌		
?	Sieb mit der Barcode-ID + EGTDMED10/\$+005951 überschreiben?		
	Ja Nein		
Abb liber of AO			

Abbildung 10