

Update 5.10

5.10 Beta 1

beholden: bei den neuen Miele PLD und PLW Geräten kam es zu Übertragungsfehlern mit der Nr. 404

beholden: Protokolle im Sys-Dateiformat von Euronda Euroseal Valida Geräten wurden nicht angezeigt

MP Touch

intern: Aktualisierungen der Mehrsprachigkeit (Übersetzungen)

intern: Verbessertes Auslesen von Barcodes

Verbessert: Rückmeldung bei nicht erkannten oder falschen Barcodes in den Hygienebüchern



Abbildung 1: Scan eines ungültigen Codes

Außerdem neu: Etikettendruck für die Desinfektion

Allgemein

Der Lesetest wurde um die Anzeige der erkannten Barcodesymbologie erweitert.

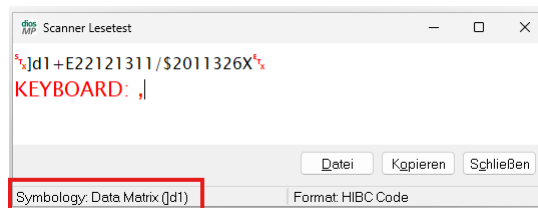


Abbildung 2: Lesetest - Symbologie

Desinfektion

Ein neues Barcodesystem für die Rückverfolgung von Desinfektionsgut wurde eingeführt. Der Etikettendruck innerhalb der Desinfektion gestaltet sich ähnlich wie der Sterilisation:

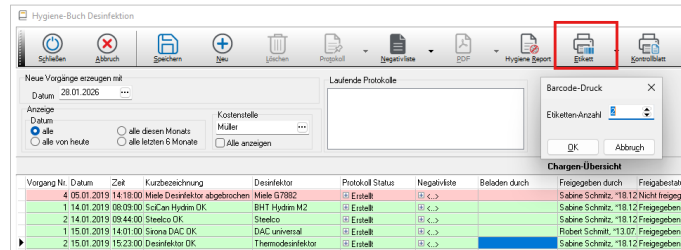


Abbildung 3: Etikettendruck Desinfektion



Abbildung 4: Beispiel eines Desinfektionscodes

Die Barcodes können wie gewohnt später in der Verbrauchserfassung am Patienten gescannt werden. Ein Ausdruck der Etiketten ist ebenfalls in der Touch Oberfläche möglich.

Geräte

Gemäß der aktuellen Betreiberverordnung MPBetreibV wurde §13 auf §14 umnummeriert:

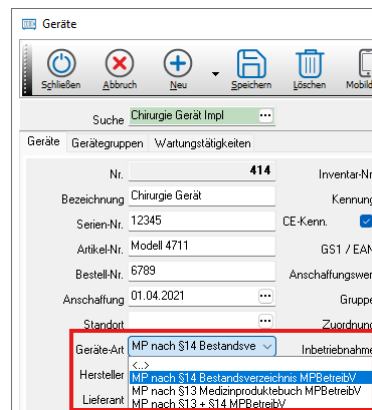


Abbildung 5: MPBetreibV §14

Mitarbeiter

Behoben: Unter dem Reiter Formulare konnten bereits bestehende Dokumente nicht mehr angezeigt, bearbeitet oder gelöscht werden.

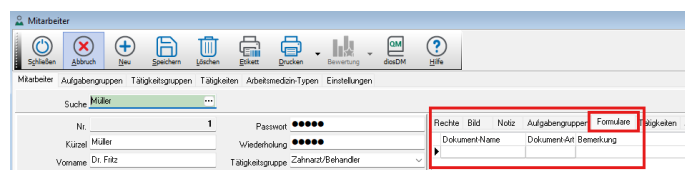


Abbildung 6: Mitarbeiter - Formulare