

Einrichtung Melag FTP-Server

Erstinstallation des Melag FTP-Servers

Hinweis: Der in diesem Beitrag verwendete FTP-Server der Firma Melag kann über die Hersteller Homepage » www.melag.de im Bereich Service -> Download Center -> Dokumententyp -> PC-Anwendungen/Software -> Melag FTP Server, bezogen werden.

Beachten Sie, dass bei der Einrichtung des FTP-Servers der Port 21 in der Firewall freigeschaltet werden muss. Kontaktieren Sie dazu Ihren Administrator.

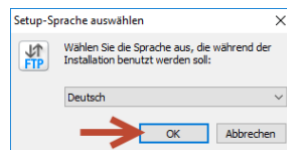


Abbildung 1: Auswahl Sprache für Installations-Assistent



Abbildung 2: Installations-Assistent Melag FTP-Server

Sollte der FTP-Server auf einem Server installiert werden, ist die Installation "als Windows Dienst" empfohlen. Bei einer Installation des FTP-Servers auf dem PC, an welchem das Hygienegerät angeschlossen ist, empfehlen wir die Installation als Anwendung.

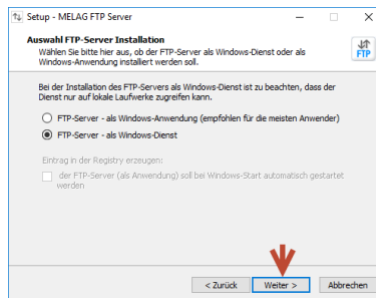


Abbildung 3: Installations-Assistent Melag FTP-Server

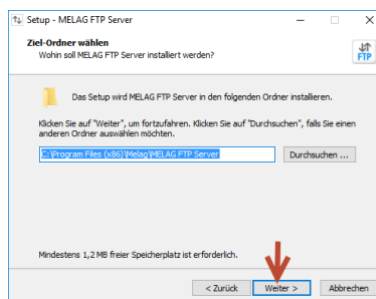


Abbildung 4: Auswahl Installationsverzeichnis

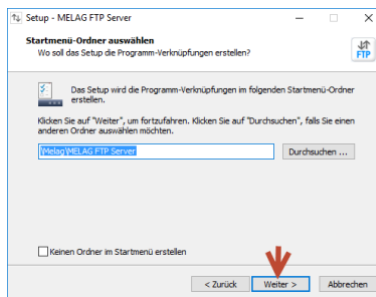


Abbildung 5: Startmenü Eintrag

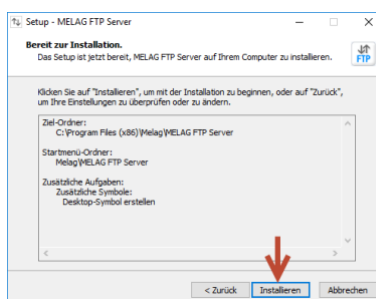


Abbildung 6: Start der Installation



Abbildung 7: Fertigstellung der Installation

Einrichtung des FTP-Servers

Starten Sie die Melag FTP-Server-Verwaltung und drücken Sie auf den "Starten"-Button um den FTP-Server zu starten.



Abbildung 8: Menü der FTP-Server-Verwaltung

Erstellen Sie eine FTP-Gruppe durch das Klicken des "Hinzufügen"-Buttons.

Wählen Sie nun die IP-Adresse des PCs oder Servers auf welchem der FTP-Server läuft in dem Auswahlfeld "IP-Adresse" aus.

Der Port ist für Melag Geräte standardmäßig 21.

Wenn der FTP-Server automatisch beim starten des Rechners mitgestartet werden soll, setzen Sie den Haken bei "Autostart".

Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch das Drücken des "OK"-Buttons.



Abbildung 9: Erstellen der FTP-Gruppe

Starten Sie die FTP-Gruppe durch das Klicken des "Starten"-Buttons um der FTP-Gruppe Hygienegeräte

zuordnen zu können.

Nun Klicken Sie auf den "Hinzufügen"-Button in der Kategorie "FTP-Gruppenkonten".



Abbildung 10: FTP-Gruppe starten

Geben Sie nun an um was für eine Art Hygienegerät es sich bei dem Gerät handelt, welches Sie per FTP mit diosMP verknüpfen wollen (z.B. Siegelgerät, Autoklav, ...).

Definieren Sie einen Benutzernamen und ein Passwort, welches dem Gerät zugeordnet werden soll. Den Benutzernamen und das Passwort müssen Sie sich abspeichern, da diese für die Verknüpfung in diosMP nochmal benötigt werden und das Passwort in der Melag FTP-Server - Software nach Erstellung nicht mehr eingesehen werden kann.

Bei älteren Melag Geräten (z.B. Vacuklav 40B) ist es nicht möglich die Benutzerdaten am Gerät zu hinterlegen. Bei diesen älteren Geräten verwenden Sie in der Melag FTP-Software die Seriennummer als Benutzernamen und das Passwort "MELAG12345".

Wählen Sie nun noch das Ablageverzeichnis, wo das Hygienegerät erstellte Protokolle abspeichern soll.

Als Letztes setzen Sie den Haken bei "aktiv".

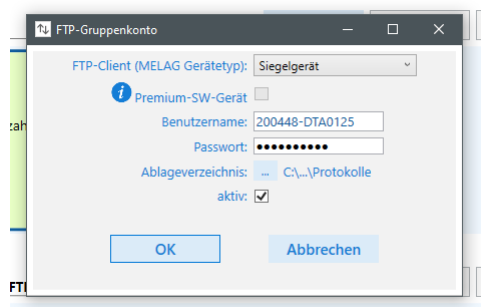


Abbildung 11: Einrichtung FTP-Gruppenkonto