

Allgemein: Geräte ohne Kabeldirektverbindung

Es ist prinzipiell möglich Protokolle eines Hygienegeräts ohne direkte Kabelverbindung in diosMP auszulesen.

Voraussetzung hierfür ist, dass das Hygienegerät die Protokolle auf einem Datenträger wie z.B. einem USB-Stick oder einer Speicherkarte ablegen kann.

Es ist außerdem wichtig dass Sie wissen in was für einem Format Ihr Hygienegerät die Protokolle schreibt / abspeichert (beispielsweise protokoll.txt, protokoll.html, ...)

Den USB-Stick oder die SD-Karte, mit den Protokollen welche ausgelesen werden sollen, an den PC anschließen, auf dem diosMP läuft.

Die Protokolldateien in ein Verzeichnis ablegen, auf das diosMP zugriff hat.

Gehen Sie in diosMP in die Optionen und auf die Kategorie "Hygiene". Klicken Sie nun auf den entsprechenden Reiter, abhängig von der Art Ihres Hygienegeräts.

Beispielsweise wenn Ihr Gerät ein Sterilisator ist, drücken Sie nun auf "Sterilisation".

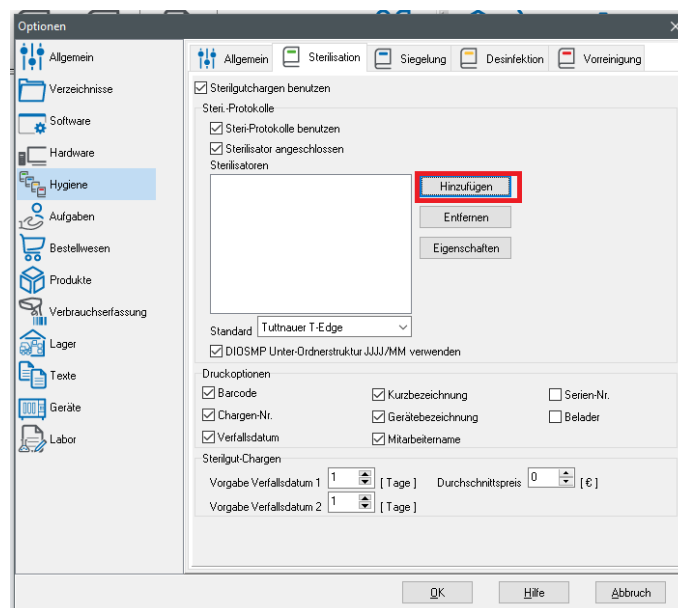


Abbildung 1: Gerät in diosMP hinzufügen

Geben Sie in dem Feld "Bezeichnung" den Namen Ihres Hygienegeräts ein.

In dem Auswahlfeld "Schnittstelle" wählen Sie "Datei kopieren".

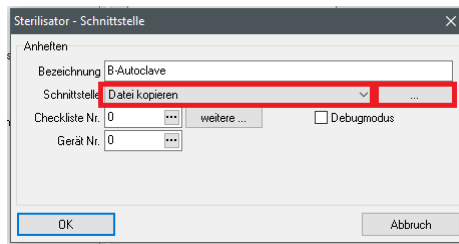


Abbildung 2: Schnittstelle konfigurieren

Der folgende Schritt ist abhängig davon, in was für einem Datei-Format Ihr Hygienegerät die Protokolldateien abspeichert:

Arten der Dateiformate der Protokolldateien

Protokolldateien als .txt - Datei

Geben Sie in dem Feld "Eingabeordner" das Verzeichnis an, unter welchem Sie die Protokolldateien des USB-Sticks / der SD-Karte abgespeichert haben.

Wenn Ihr Hygienegerät die Protokolldateien als .txt - Datei abspeichert, wählen Sie in dem Auswahlfeld "Schnittstelle" "Standard TXT" aus.

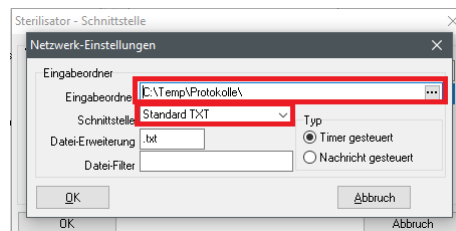


Abbildung 3: Schnittstellendetails konfigurieren

Protokolldateien als .html / .htm - Datei

Hinweis: Vergewissern Sie sich ob die Protokolldateien Ihres Hygienegeräts im .html oder .htm Format gespeichert sind.

Geben Sie in dem Feld "Eingabeordner" das Verzeichnis an, unter welchem Sie die Protokolldateien des USB-Sticks / der SD-Karte abgespeichert haben.

Wenn Ihr Hygienegerät die Protokolldateien als **.htm** - Datei abspeichert, wählen Sie in dem Auswahlfeld "Schnittstelle" "W&H HTML" aus.

Wenn Ihr Hygienegerät die Protokolldateien als .html Datei abspeichert, wählen Sie in dem Auswahlfeld "Schnittstelle" ebenfalls "W&H HTML" aus.

Außerdem müssen Sie noch in dem Feld "Datei-Erweiterung" den Wert auf ".html" ändern.

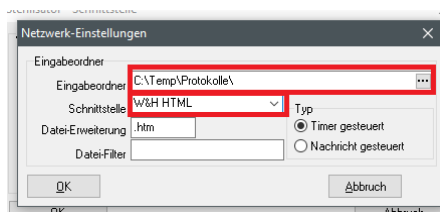


Abbildung 4: Schnittstelle konfigurieren - HTM

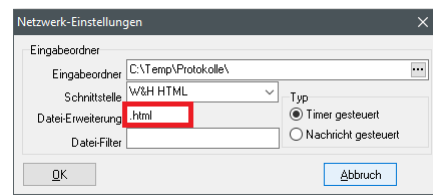


Abbildung 5: Schnittstelle konfigurieren - HTML

Protokoll in diosMP auslesen

Gehen Sie in diosMP in das jeweilige Hygienebuch (Sterilisation, Vorreinigung, Desinfektion, Siegelung), abhängig von der Art Ihres Hygienegeräts.

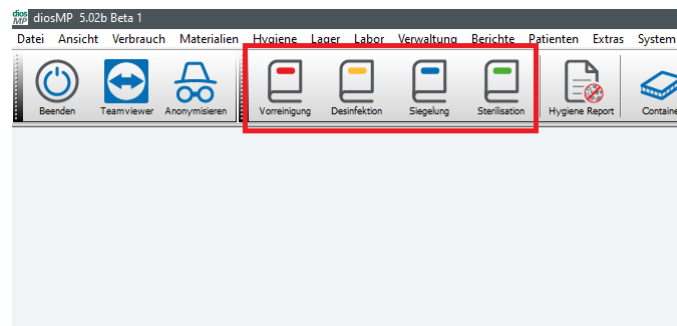


Abbildung 6: Auswahl Hygienebuch

Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Button "Neu", um Ihr angelegtes Hygienegerät auszuwählen.

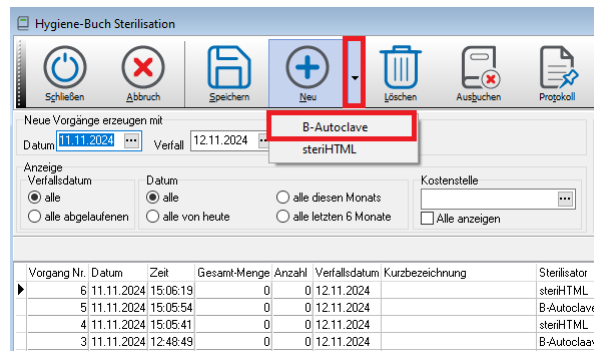


Abbildung 7: Auswahl Hygienegerät

Es öffnet sich ein Fenster mit den vorhandenen kompatiblen Protokolldateien auf der linken Seite. Wählen Sie die Protokolldatei aus, welche Sie auslesen möchten.

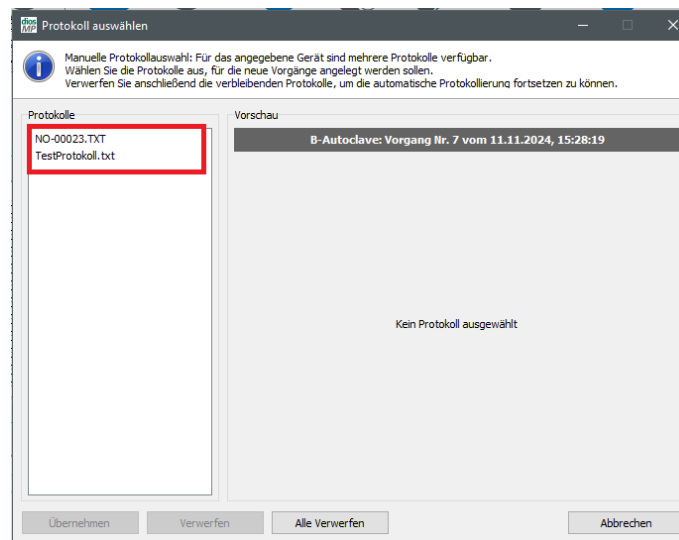


Abbildung 8: Auswahl Protokoll

Es wird nun eine Vorschau der Datei auf der rechten Hälfte des Fensters angezeigt.

Drücken Sie auf den Button "Übernehmen".

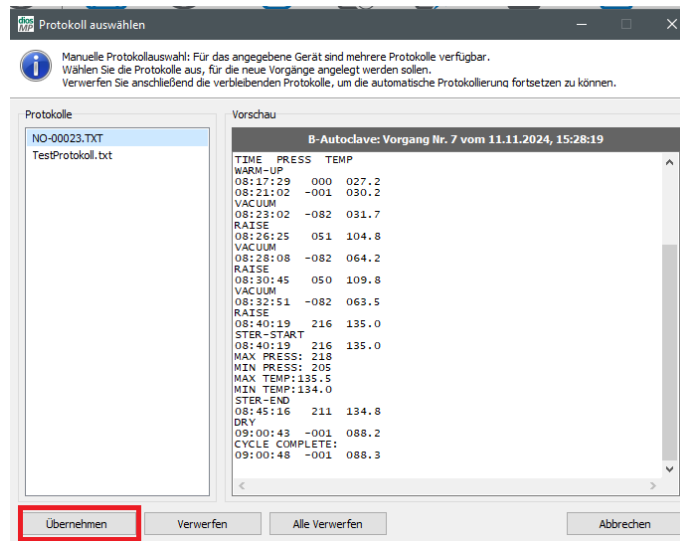


Abbildung 9: Vorschau Protokoll