

Einrichtung DataSter

Erstinstallation DataSter

DataSter ist eine Software, welche sich mit Ihrem Hygienegerät in ihrem lokalen Netzwerk verbindet und in regelmäßigen Abständen automatisch alle verfügbaren Protokolldaten als PDF Format in ein von Ihnen festgelegtes Verzeichnis exportiert. Während des Export arbeiten die Hygienegeräte ganz normal weiter. Der Export der Protokolldaten hat somit **keine** direkten Auswirkungen auf die Leistung und Funktionalität der Hygienegeräte.

DataSter wird von einigen Sterilisationsgeräten benötigt um Protokolldateien an diosMP zu übermitteln, da sich diosMP die Protokolldaten aus dem oben genannten Verzeichnis holt.

DataSter können Sie [»hier herunterladen](#).

Starten Sie das Installationsprogramm für DataSter und folgen Sie den Anweisungen.

Lassen Sie den Haken bei "Launch DataSter" aktiv, damit DataSter nach der Installation automatisch gestartet wird und drücken Sie dann auf "Finish".

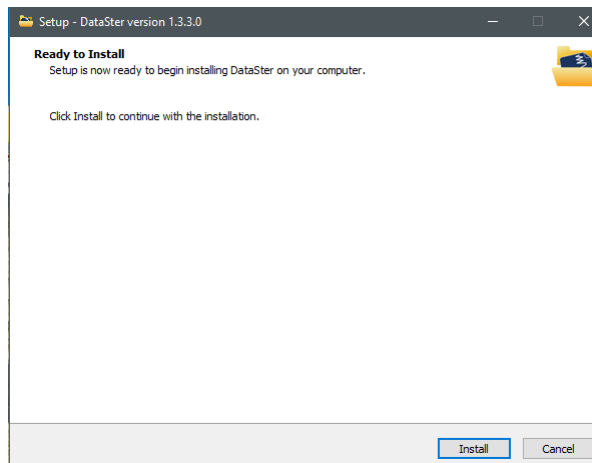


Abbildung 1: Starten des Installationsprogramms

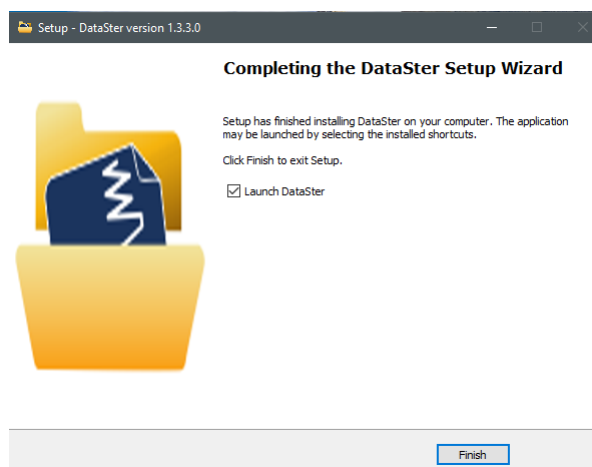


Abbildung 2: Installation von DataSter erfolgreich

Einrichtung der Sterilisatoren in DataSter

Geben Sie unter "Serial Number" die Seriennummer Ihres Sterilisationsgeräts ein.

Wird die IP-Adresse des Sterilisators nicht automatisch im Feld "IP-Adress" eingetragen, deaktivieren Sie den Haken bei "Autodetect IP Address" und geben Sie die IP-Adresse Ihres Sterilisators manuell im Feld "IP-Address" ein.

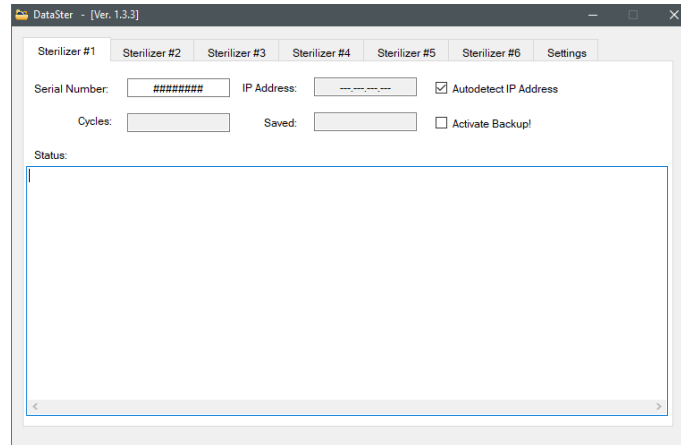


Abbildung 3: Einrichtung Sterilisator in DataSter

Klicken Sie auf den Button "SELECT FOLDER" um den Ablagepfad zu auswählen zu können, in welchem DataSter die Protokolldateien Ihres Sterilisators ablegt.

Auf dieses Verzeichnis greift diosMP zu um sich die Protokolldateien zu holen.

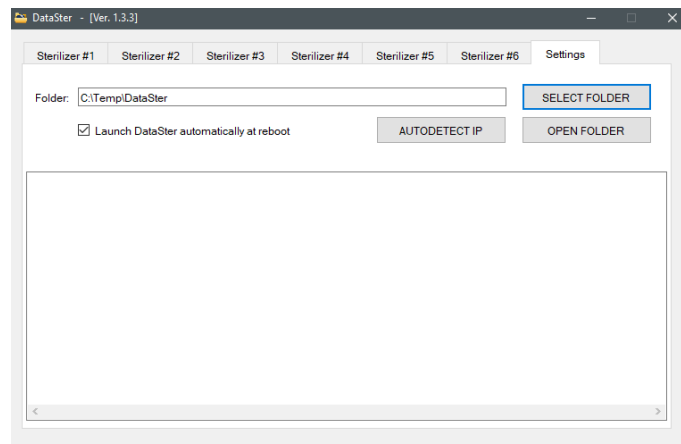


Abbildung 4: Einrichtung des Ablagepfads von DataSter