

Melag MELaseal 300

Hinweis: Für die Verbindung zwischen dem MELaseal300 und diosMP wird ein FTP-Server benötigt. Es wird empfohlen den von Melag zur Verfügung gestellten Melag-FTP-Server zu verwenden. Der FTP-Server und das Siegelgerät müssen im gleichen IP-Adressbereich liegen. Die IP-Adresse des PCs auf dem der FTP-Server läuft muss fest sein.

Einstellungen am FTP-Server

Zur Dokumentation der Einrichtung des von Melag zur Verfügung gestellten FTP-Servers »kommen Sie hier.

Einstellungen am Gerät

Damit das Siegelgerät Protokolle in einem Verzeichnis ablegen kann, auf welches diosMP dann zugreift, müssen zuerst die FTP-Einstellungen an dem Siegelgerät konfiguriert werden:

Gehen Sie im Menü in die "Einstellungen" und dann in das Untermenü "Protokollausgabe". Dort klicken Sie dann auf "FTP-Server".

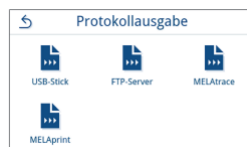


Abbildung 1: Protokollausgabe

Nun müssen folgende Einstellungen getroffen werden:

Sofortausgabe: "on" oder "off". Wird hier "on" ausgewählt, wird nach jeder erfolgreichen Siegelung ein Siegelprotokoll ausgegeben. Mit der Einstellung "off" wird das erzeugte Siegelprotokoll nur auf dem Gerät gespeichert.

IP: Hier muss die feste IP-Adresse des FTP-Servers, beziehungsweise des PCs auf dem der FTP-Server läuft eingetragen werden. Mit einem Klick auf das "Stift-Symbol" rechts neben dem IP-Adressfeld kann die IP-Adresse geändert werden.



Abbildung 2: FTP-Server Konfiguration am Siegelgerät



Abbildung 3: Konfiguration IP-Adresse am Siegelgerät

"Benutzername": Hier muss der Benutzername, welcher im FTP-Server angelegt wurde eingetragen werden. Dabei ist auf Übereinstimmung zu achten.



Abbildung 4: Konfiguration Benutzername

"Passwort": Hier muss das Passwort, welches im FTP-Server hinterlegt wurde, eingetragen werden. Dabei ist auf Übereinstimmung zu achten.

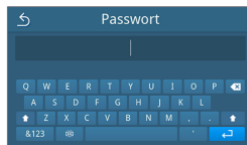


Abbildung 5: Konfiguration Passwort

Nun müsste die Anzeige wie in folgendem Bild angezeigt werden und die Buttons "Testen" und "Speichern" sollten aktiviert / "anklickbar" sein.



Abbildung 6: Ende der Konfiguration am Siegelgerät

Einstellungen im Programm

Gehen Sie in diosMP in die Optionen und wählen Sie unter "Hygiene" den Reiter "Siegelung" aus.

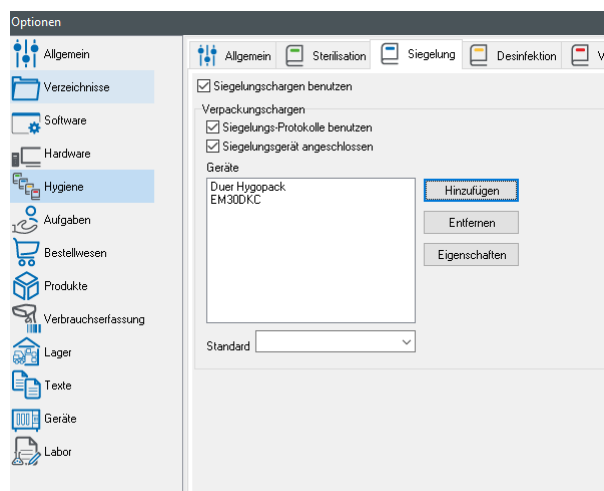


Abbildung 7: Optionen diosMP

Geben Sie unter "Bezeichnung" den Namen des Geräts ein.

Unter Schnittstelle wählen Sie "Automatische Dateiüberwachung" aus und drücken auf den Button "..." rechts daneben.

Es öffnen sich die erweiterten Netzwerkeinstellungen für die ausgewählte Schnittstelle.

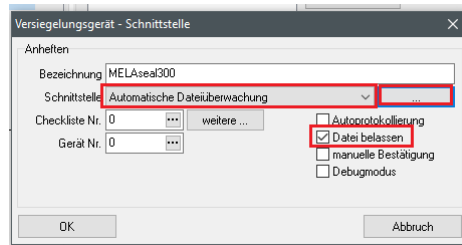


Abbildung 8: Einrichtung Schnittstelle

Geben Sie unter Eingabeordner den Pfad an, an welchem das MELAseal Gerät die Dateien per FTP ablegt.

In dem Auswahlfeld "Schnittstelle" wählen Sie "W&H HTML" aus.

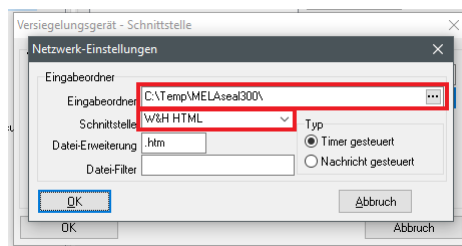


Abbildung 9: Einrichtung Schnittstelle Details

Protokoll der Tagescharge ausgeben

Um das Protokoll der aktuellen Tagescharge ausgeben zu können muss hierzu am MELAseal Gerät unten gekennzeichneten Button 7 gedrückt werden. Hierbei werden nun alle Siegelnahte des Tages in eine Datei geschrieben.

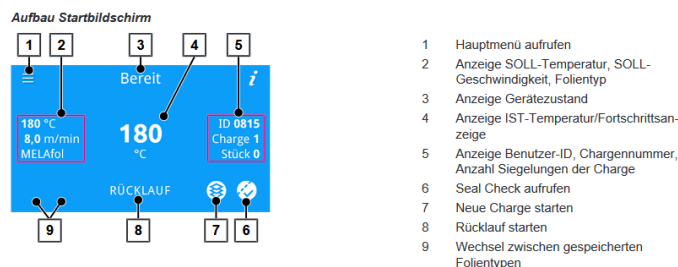


Abbildung 10: Bedienfläche Übersicht