

Dürr Hygopac View

Einstellungen am Gerät

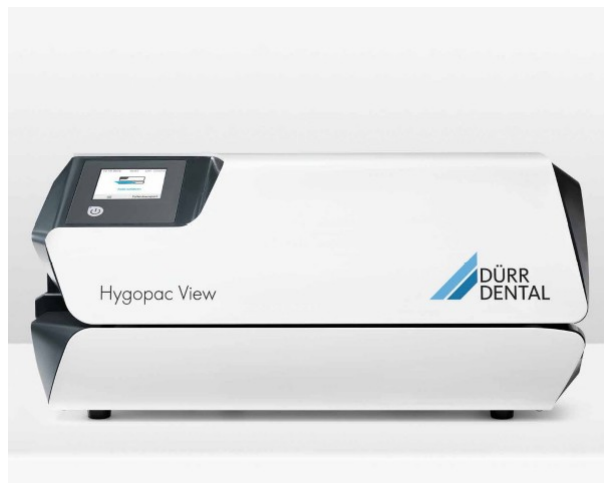


Abbildung 1: Hygopac View

Klicken Sie auf den Button mit den 3 Strichen untereinander um in die Einstellungen zu gelangen.



Abbildung 2: Einstellungen

Gehen Sie nun auf "Zugriffsebene" und klicken Sie auf "Administrator".

Bestätigen Sie die Auswahl über den Enter-Button (unterer rechter Knopf).

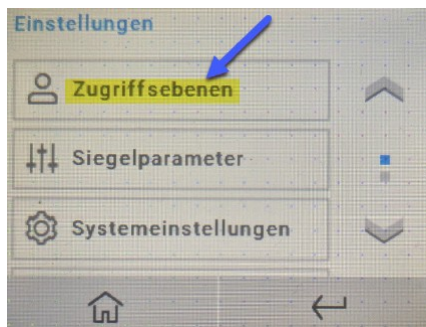


Abbildung 3: Zugriffsebene

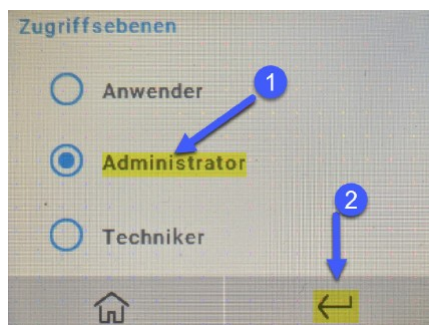


Abbildung 4: Zugriffsebene Auswahl

Gehen Sie nun auf "Systemeinstellungen" und danach auf "Netzwerk".

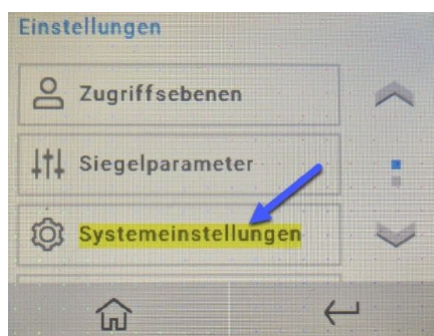


Abbildung 5: Systemeinstellungen

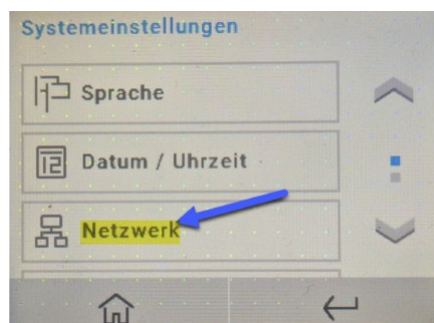


Abbildung 6: Netzwerkeinstellungen

Vergewissern Sie sich das "DHCP" deaktiviert ist und (falls noch nicht geschehen) vergeben Sie dem Gerät über den Punkt "IP-Adresse" eine noch freie IP in ihrem Netzwerk. Diese IP-Adresse darf nicht durch den DHCP-Server erneut vergeben werden.

(WICHTIG: Die Vergabe einer gültigen IP-Adresse sollte immer in Absprache mit Ihrem IT-Dienstleister durchgeführt werden).

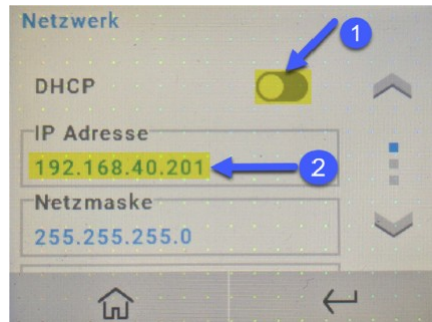


Abbildung 7: Netzwerkeinstellungen konfigurieren

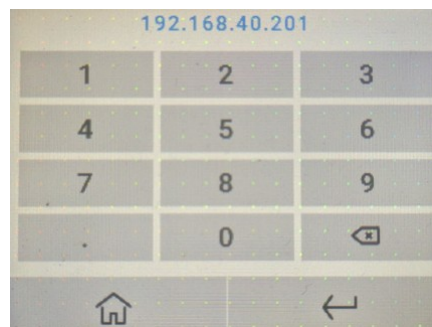


Abbildung 8: IP-Adresse vergeben

Als Syslog IP-Adresse muss die IP-Adresse des "Steri-PC" eingetragen werden. Beachten Sie, dass die IP-Adresse des "Steri-PC" fixiert werden muss. Entweder via DHCP Reservierung oder im Netzwerkcontroller des Computers.

Zudem sollte der Default Syslog Port von 514 auf einen freien UDP Port des Netzwerk geändert werden, wie in diesem Beispiel auf Port 520. Dieser UDP Port muss zudem in der Firewall freigeschaltet werden.

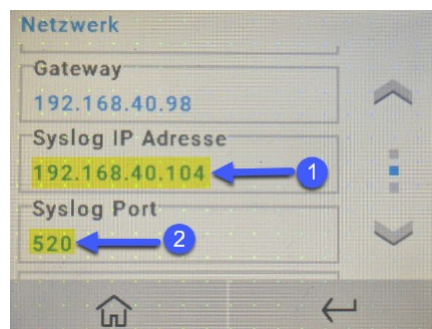


Abbildung 9: SysLog IP-Adresse

Deaktivieren Sie die Syslog Heartbeat Optionen und bestätigen Sie die Änderungen.

Schalten Sie anschließend das Gerät mit der Ein/Ausschalter Taste aus und trennen Sie das Gerät für mind. 15. Sekunden vom Strom.

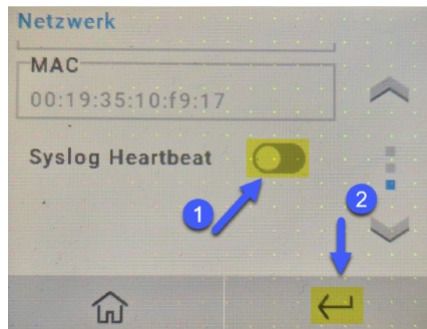


Abbildung 10: Deaktivieren der Syslog Heartbeat Optionen

Einstellungen im Programm

Gehen Sie in diosMP in die Einstellungen, in dem Sie im Hauptmenü auf "System" und dann auf "Optionen" klicken.

Navigieren Sie in den Einstellungen auf den Reiter "Hygiene" und dann auf "Siegelung".

Klicken Sie nun auf den Button "Hinzufügen".

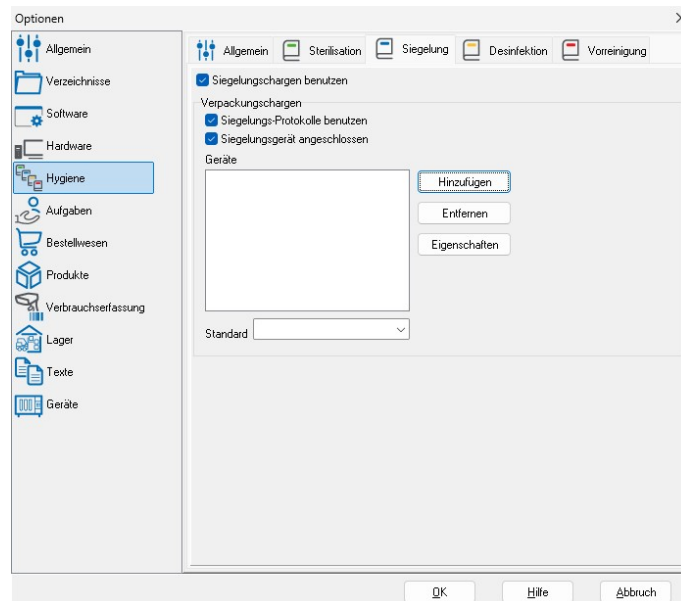


Abbildung 11: diosMP - Einstellungen

Geben Sie in dem Feld "Bezeichnung" den Namen des Hygienegeräts ein.

Wählen Sie in dem Auswahlfeld "Schnittstelle" den Wert "Native Netzverbindung".

Wählen Sie in dem Auswahlfeld "Typ" den Wert "Duerr".

Klicken Sie dann auf den Button "... " rechts neben dem Auswahlfeld "Schnittstelle".



Abbildung 12: Schnittstelle konfigurieren

Geben Sie unter IP-Adresse die IP-Adresse des Hygienegeräts an und unter IP-Port den Port, welchen Sie zuvor am Hygienegerät eingetragen haben (siehe Syslog IP-Port)

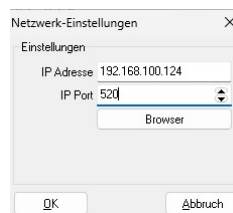


Abbildung 13: Schnittstellendetails konfigurieren